



## nesta edição

- ▶ **EEG em crianças:** Dicas para facilitar o trabalho e evitar artefatos.
- ▶ **Procedimentos de Ativação:** Saiba mais sobre a hiperventilação.
- ▶ **Destaque:** conheça o maior laboratório da América Latina.
- ▶ **Marketing:** Medicina com estratégia - Um bom negócio.
- ▶ **Classificados:** Um espaço só para você anunciar.

### III CONGRESSO LATINO AMERICANO DE NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA em Porto Seguro.

Saiba o que aconteceu por lá.

# MaxxiFix é ÚNICA.

A MaxxiFix sempre foi apontada como um produto que proporciona alta condutividade, bom desempenho e qualidade inquestionável. Agora será apontada também como **a única pasta com registro no Ministério da Saúde.**

Vale a pena investir em segurança e tranquilidade que somente a MaxxiFix oferece.

Isto significa mais confiança, responsabilidade e preocupação com os milhares de pacientes e Técnicos (as) que utilizam a MaxxiFix diariamente.

Sua formulação, além de antialérgica, contém emolientes que hidratam e evitam o ressecamento da pele devido ao uso prolongado. Sua fácil remoção requer apenas um pouco de água.



# Ciência

## Hiperventilação

### Como proceder na hora exame

Quando estiver utilizando o EEG como instrumento clínico, nunca esqueça que o registro do EEG é simplesmente uma amostragem aleatória, feita num período de tempo específico.

Em alguns casos é necessário que os distúrbios neurológicos que produzem anormalidades transitórias ao EEG coincidam com o tempo do registro, para que não sejam interpretados como normais.

Alguns procedimentos de ativação desencadeiam e potencializam certas atividades normais e anormais no EEG.

Conheça mais, sobre os procedimentos da hiperventilação:

### ▶ Procedimentos com o paciente




**A Hiperventilação talvez seja o procedimento de ativação mais amplamente usado nos laboratórios de eletroencefalografia.**

- Explique o procedimento com detalhes.
- Peça para o paciente relaxar, manter os olhos fechados e a boca aberta. Ele deve respirar profundamente em ritmo regular até que receba o pedido de parar.
- Faça uma demonstração de como ele deve proceder e acrescente, verbalmente, dicas como "tente esvaziar completamente os pulmões e depois encha bem o peito".
- Solicite que ele evite qualquer movimento desnecessário na cabeça e parte superior do corpo, pois eles podem introduzir grandes artefatos no registro.
- Ele deverá informar imediatamente qualquer ameaça ou ocorrência real de crise convulsiva. Convém deixá-lo ciente dos sintomas comuns em alguns indivíduos que são submetidos ao processo, como formigamento nas extremidades, espasmos musculares ou sensação de tontura.

Durante a hiperventilação o paciente deve ser observado cuidadosamente. Algumas vezes, poderá ocorrer uma sonolência no meio do processo, que deve ser impedida com o alerta do(a) Técnico(a). É sempre bom marcar o tempo decorrido desde o início da hiperventilação no gráfico do EEG, para que o eletroencefalografista saiba há quanto tempo o paciente está hiperventilando.

A MF esclarece qualquer dúvida pelo serviço de atendimento gratuito: 0800 109563.

*Amostras de registros ilustram apenas uma pequena proporção das várias características diferentes presentes no EEG durante a hiperventilação.*

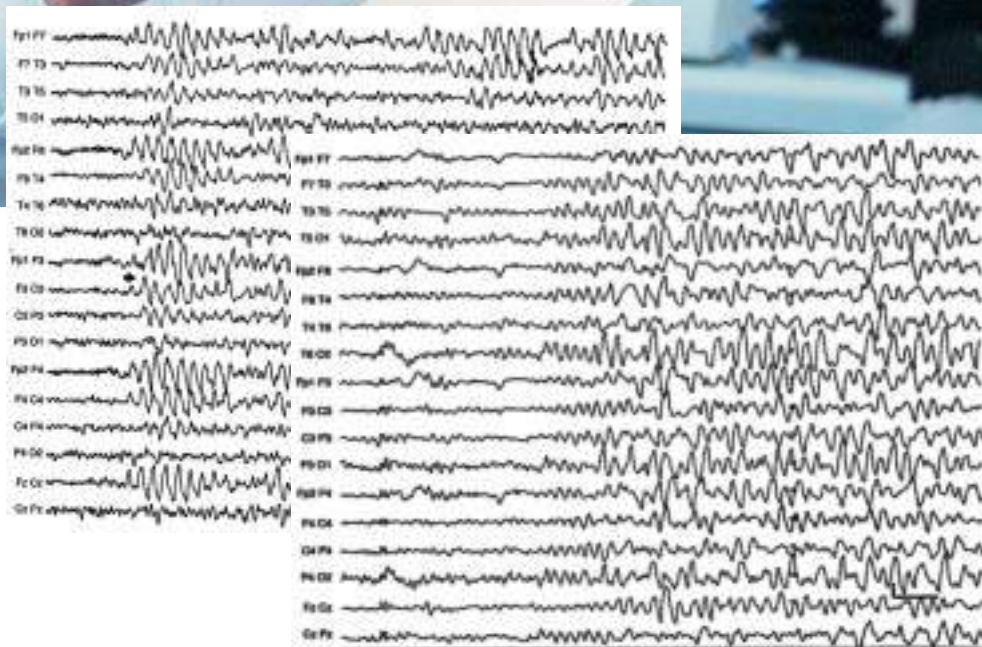



# Destaque

## Diagnósticos da América

Serviços e produtos de qualidade garantem boa parceria



Diagnósticos  
da América

Diagnósticos da América é a maior e mais completa empresa de medicina diagnóstica e saúde preventiva da América Latina.

Atende mais de 13 mil pacientes por dia, em mais de 110 unidades, realizando mais de 2 mil diferentes tipos de exames, com tecnologia de ponta, técnicas

avanzadas e os mais respeitados profissionais do mercado.

Contando atualmente com quatro divisões - Delboni Auriemo, Lavoisier, Bronstein e Lâmina - está presente em 11 cidades, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

Com a missão de promover a um número cada vez maior de pessoas o acesso ao que existe de mais moderno na área de análises clínicas, exames especializados e diagnósticos por imagem, está em constante movimento de aprimoramento, renovação e expansão.



Os profissionais do Diagnósticos da América sabem que a escolha de um equipamento de ponta é a única alternativa para se ter um serviço com qualidade e confiabilidade. É por isso que suas novas unidades estão sendo equipadas com o:

## BRAIN WAVE

Qualidade e Confiança são o nosso negócio



# Eventos

## III Congresso Latino-americano de Neurofisiologia Clínica

Saiba o que aconteceu em Porto Seguro - BA



Da esquerda para a direita: Dr. Fernando Ferreira, Dr. Gentil Araújo, Eduardo Faria e Sandro Senra.



Dr. Ricardo Teixeira



Dr. Vitor Tumas



Dra. Stella Tavares



Dr. Calixto Machado

O III Congresso Latino Americano e a XI Jornada Brasileira de Neurofisiologia, organizada pela SBNC, foi, sem dúvida alguma, o melhor evento do ano.

Cursos, simpósios, mesas redondas e workshops proporcionaram aos visitantes a constante troca de informação e conhecimento.

Com a presença de palestrantes e congressistas de peso, os temas abordados foram os mais atuais e representativos possíveis.

Assuntos como o EEG Quantitativo tratado pelo Dr. Calixto Machado (Cuba), ou o Papel Diagnóstico da Polissonografia ministrado pela Dra. Stella Maria Azevedo Tavares (Brasil), ou ainda PE na Esclerose Múltipla na Infância pelo Dr. Vitor Tumas (Brasil) e Monitorização Intra-Operatória na Infância pelo Dr. Ricardo Teixeira (Brasil), entre muitos outros, fizeram de Porto Seguro a capital da Neurofisiologia durante a segunda semana de setembro passado.

Toda a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia e os demais colegas devem estar ansiosos pela realização do próximo evento da SBNC que acontecerá no Rio de Janeiro em outubro do próximo ano.

Reserve este espaço em sua agenda e até lá!

## Expediente

**Diretor responsável:** Eduardo Faria • **Redação:** David Andrade e Eduardo Faria • **Revisão:** Heloisa Faria

**Projeto Gráfico:** www.spinolah.com.br (011) 3141 95 43 **Produção Gráfica:** Cipriano Ltda • **Tiragem:** 3000 exemplares.

**Correspondências:** MF Ltda - Pça. das Flores, 84 Centro Comercial Alphaville - Barueri - SP - Brasil - CEP 06453-011 . **Tel.:** (11) 4191 8669.

O MF Informa é uma publicação trimestral da MF. Equipamentos Médicos Ltda., sendo proibida sua reprodução. As matérias assinadas refletem o ponto de vista do autor, não tendo nenhuma associação com a política e opinião da Empresa.